

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXAFLEX PUTTY STANDARD PACKAGE (1-1)

### (01 BOX OF 500G BASE AND 01 BOX OF 500G CATALYST)

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Y-Nha Khoa Minh Phương

Địa chỉ: Số 41/38 Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

#### EXAFLEX PUTTY STANDARD PACKAGE (1-1)

Là vật liệu lấy dấu bằng Silicon dùng để lấy dấu cùi răng có độ nhớt thấp. Chủ yếu là dạng đặc, gồm 1 hộp 500g (278ml) chất xúc tác/catalyst và 1 hộp 500g (278ml) chất nền/base)

\*Khi trộn Exaflex, cần cẩn thận để tránh trộn lẫn hoặc tiếp xúc với các vật liệu khác.

Nó có thể kéo dài hoặc ảnh hưởng sự đông cứng như là:

+ Chất xúc tác cho vật liệu lấy dấu silicon

+ Latex

+ Dầu

+ Lưu huỳnh

+ Vật liệu Eugenol

\*Sau khi sử dụng, mỗi loại phải được đóng nắp ban đầu lại

\*Lưu trữ nơi khô mát

\*Tránh sử dụng Exaflex với những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với các vật liệu gây dị ứng



Đơn vị nhập khẩu

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mai Phương