

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EXAFLEX REGULAR TYPE CLINIC PACKAGE (20-20)

### (BOX OF 100G (74ML) BASE AND 100G (74 ML) CATALYST)

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ Y-Nha Khoa Minh Phương

Địa chỉ: Số 41/38 Phương Mai, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

#### Exaflex Regular Type Clinic Package (20-20):

- Nặn 2 chất vừa đủ theo tỉ lệ 1:1 lên giấy trộn
- Trộn nhanh 2 chất trong khoảng 2 phút cho đến khi đạt được một hỗn hợp đồng nhất
- Lấy hỗn hợp và nạp vào ống bơm cao su
- Bơm hỗn hợp vào vùng răng đã được chuẩn bị
- Cho vật liệu lấy dấu vào khay
- Đặt khay vào miệng
- Chờ đông cứng, thời gian thích hợp khoảng 4 phút
- Sau khi vật liệu đã đông cứng, lấy dấu ra và đổ mẫu ngay lập tức

\*Khi trộn Exaflex, cần cẩn thận để tránh trộn lẫn hoặc tiếp xúc với các vật liệu khác.

Nó có thể kéo dài hoặc ảnh hưởng sự đông cứng như là:

+ Chất xúc tác cho vật liệu lấy dấu silicon

+ Latex

+ Dầu

+ Lưu huỳnh

+ Vật liệu Eugenol

\*Sau khi sử dụng, mỗi loại phải được đóng nắp ban đầu lại

\*Lưu trữ nơi khô mát

\*Tránh sử dụng Exaflex với những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với các vật liệu gây dị ứng

Đơn vị nhập khẩu  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Mai Phương*