

TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT

stt	Đề mục	Nội dung tóm tắt
1	Mô tả trang thiết bị y tế: Băng bó bột sợi thủy tinh Alpha Cast	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được làm từ vải sợi thủy tinh tấm nhựa Polyurethane và tạo ra phản ứng hóa học làm cứng miếng băng bột khi tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước trong thời gian nhất định. - Trọng lượng nhẹ, thoáng khí, độ cứng cao, tương thích để chụp X-Quang. - Mép cắt không sắc giảm thiểu tổn thương khi sử dụng - Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau phù hợp với nhiều vị trí chấn thương và mục đích sử dụng khác nhau. - Tháo bột bằng máy cưa bột hoặc kìm cắt bột - Sản phẩm chỉ sử dụng một lần
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/chỉ định	Chuyên dùng trong chấn thương chỉnh hình, Cố định xương hoặc sau phẫu thuật
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dùng tất lót hoặc bông lót quần quanh vùng chấn thương cần cố định 2. Chọn kích thước Bột bó phù hợp với vùng chấn thương 3. Đi găng tay. 4. Mở bao bì và lấy sản phẩm ra khỏi túi 5. Ngâm bột vào nước sạch khoảng 5 giây sau đó giữ bớt nước dư ra khỏi cuộn băng bột 6. Quần băng lên vùng bó bột, quá trình tạo khuôn và đông cứng bột sẽ diễn ra trong quá trình này. Độ bền cơ năng sẽ đạt được sau khoảng 20 phút. 7. Sử dụng cưa cắt bột hoặc kìm cắt bột để tháo bột
1.5	Chống chỉ định	Gãy xương độ III, IV
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Kiểm tra hạn sử dụng trước khi dùng. Trong quá trình bảo quản, vận chuyển tránh làm thủng bao bì. Sử dụng găng tay khi tiếp xúc với sản phẩm
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành ở các nước nếu có	Hàn Quốc
3	Chỉ định đã đăng ký ở nước khác nếu có	
4	Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

