

# TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA DỤNG CỤ PHẪU THUẬT

## 1. Cách sử dụng:

- Trước khi sử dụng, phẫu thuật viên, y tá cần hiểu rõ về mục đích sử dụng cũng như hạn chế của dụng cụ phẫu thuật trong thực hiện phẫu thuật.
- Khi sử dụng những dụng cụ phẫu thuật có cạnh, đầu sắc nhọn cần cẩn thận tránh cửa qua lớp bao tay phẫu thuật, không được chạm vào đầu dụng cụ khi sử dụng.
- Phải luôn tiệt trùng dụng cụ trước mỗi lần sử dụng.

## 2. Cách vệ sinh và bảo quản dụng cụ:

- Chỉ sử dụng nước cất để rửa sạch dụng cụ, không sử dụng nước có chứa clo vì có thể làm hỏng hoặc phá hủy dụng cụ.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính ăn mòn, nên sử dụng dung dịch khử trùng với độ pH bằng 7.
- Dụng cụ nên được tiệt trùng bằng phương pháp tiệt trùng nhiệt ẩm ở 132 độ C trong 15 phút trước khi sử dụng để phẫu thuật. Nhiệt độ tiệt trùng không được vượt quá 137 độ C.
- Tất cả dụng cụ phải khô hoàn toàn trước khi bảo quản, bảo quản dụng cụ ở nơi khô ráo, thoáng mát.
- Khi sắp xếp dụng cụ, phải luôn đặt các dụng cụ trong tấm vải mềm hoặc khăn, dụng cụ nặng hơn bên dưới, dụng cụ nhẹ hơn bên trên để tránh hư hỏng dụng cụ.

**Đại diện công ty**

