

TÓM TẮT KỸ THUẬT

Viên đặt phụ khoa GVAGZOL

STT	Mục	Nội dung
1	Mô tả	Nguyên lí hoạt động và tính năng: <ul style="list-style-type: none">- Viên đặt làm cân bằng môi trường Ph trong âm đạo- Với thành phần từ thảo mộc thiên nhiên, viên đặt giúp giữ cho âm đạo luôn sạch sẽ, ngăn ngừa các vi khuẩn, nấm ngứa xâm nhập, loại bỏ khí hư.- Dạng viên trứng, dễ dàng sử dụng, mang lại hiệu quả cao.- Vì 7 viên, kích thước 83x20x83mm
2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không
3	Mục đích/chỉ định sử dụng	Làm cân bằng môi trường, sử dụng 1 lần (<30 phút)
4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Thời điểm đặt: để mang lại hiệu quả cao chị em nên đặt viên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ và sau khi đã vệ sinh vùng kín sạch sẽ.- Tư thế đặt: ngồi xổm, nằm co chân.- Vệ sinh tay sạch và nên cắt ngắn móng tay để tránh gây ra tổn thương đối với vùng kín.- Dùng ngón trỏ đẩy viên đặt từ từ vào sâu bên trong âm đạo cỡ 1,5- 2cm. Nếu cảm thấy khó khăn, trước khi đặt bạn có thể nhúng viên đặt qua nước nhanh chóng để viên đặt dễ trôi vào hơn. Thao tác này đòi hỏi thực hiện nhẹ nhàng và nhanh chóng để viên đặt không bị dính vào ngón tay và trở ngược ra ngoài.- Đối với mẹ bầu, việc đặt viên đặt sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, hãy nhờ sự trợ giúp của bác sĩ khi đặt viên đặt.
4	Chống chỉ định	Đị ứng với bất kì thành phần nào của viên đặt
5	Cảnh báo	<ul style="list-style-type: none">- Sử dụng theo đúng hướng dẫn- Theo chỉ định của bác sĩ
6	Tác dụng phụ	Không

Đại diện pháp luật

(ký, họ tên, chức danh)



GIÁM ĐỐC

Dinh Trung Hiếu