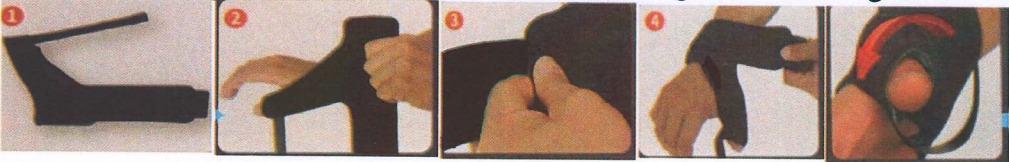


**TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT**

stt	Đề mục	Nội dung tóm tắt
1		<b>Mô tả trang thiết bị y tế: Nẹp ngón tay cái A6</b>
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Sản phẩm được làm bằng chất liệu neoprene tự dính, khóa Velcro dễ dàng điều chỉnh. Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp cho cố định ngón tay cái trong khi các ngón tay còn lại vẫn có thể cử động
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Mỗi sản phẩm được đóng gói riêng biệt vào túi nylon hoặc hộp
1.3	Mục đích/chỉ định	- Cố định ngón cái và khớp cổ tay trong điều trị, phục hồi chức năng mà không hạn chế hoạt động của cẳng tay, bàn tay và các ngón tay khác - Điều trị sau phẫu thuật viêm bao gân duỗi ngón cái (hay còn gọi ngón tay cò súng, ngón tay lò xo, viêm hẹp gân gấp...)
1.4	Hướng dẫn sử dụng	1. Mở sản phẩm ra và định vị ngón tay muốn cố định 2. Đưa ngón tay cái vào sản phẩm 3. Giữ và quấn phần dây đai ở cổ tay sau đó điều chỉnh cho phù hợp 4. Quấn dây đai quanh ngón tay cái theo chiều ngược kim đồng hồ 
1.5	Chống chỉ định	Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành ở các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ****GIÁM ĐỐC***Lưu Thị Thủy*