

Hướng dẫn sử dụng nẹp ngón tay cái A6

I. Chỉ Định:

- Cố định ngón cái và khớp cổ tay trong điều trị, phục hồi chức năng mà không hạn chế hoạt động của cẳng tay, bàn tay và các ngón tay khác
- Điều trị sau phẫu thuật viêm bao gân duỗi ngón cái (hay còn gọi ngón tay cò súng, ngón tay lò xo, viêm hẹp gân gấp...)

II. Chống chỉ định: Đây là sản phẩm hỗ trợ ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

III. Bảo quản: Giặt bằng tay, không giặt máy, không dùng chất tẩy, bảo quản nơi thoáng mát.

IV. Khuyến Cáo: Sử dụng theo chính định của bác sĩ

V. Hướng dẫn sử dụng

1. Mở sản phẩm ra và định vị ngón tay muốn cố định
2. Đưa ngón tay cái vào sản phẩm
3. Giữ và quấn phần dây đai ở cổ tay sau đó điều chỉnh cho phù hợp
4. Quấn dây đai quanh ngón tay cái theo chiều ngược kim đồng hồ



Bảng cỡ

Cỡ sản phẩm	Mã số
UNI	VN1704

