

**TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT**

stt	Đề mục	Nội dung tóm tắt
1	<b>Mô tả trang thiết bị y tế: Nẹp đệm A6</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Sản phẩm được làm một lớp vỏ nhựa đúc mỏng ở bên ngoài và lớp đệm mút xốp mềm và dày ở bên trong. Các dây đai kết hợp với khóa nhựa dễ dàng điều chỉnh, để cao su chống trượt khi di chuyển. Có miếng đệm chân bằng EVA có thể điều chỉnh một góc tối ưu cho bàn chân ở tư thế nghỉ. Sản phẩm phù hợp cho cả chân trái và chân phải
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Mỗi sản phẩm được đóng gói riêng biệt vào túi nylon
1.3	Mục đích/chỉ định	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấn thương xương khớp vùng cổ chân, bàn chân.</li> <li>- Viêm khớp cổ chân.</li> <li>- Tổn thương dây chằng, cân cơ vùng cổ chân, bàn chân.</li> <li>- Gãy mắt cá trong, mắt cá ngoài xương cẳng chân.</li> </ul>
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chọn kích thước phù hợp với bàn chân</li> <li>2. Tháo khóa các dây đai ở tư thế mở</li> <li>3. Cho chân vào sản phẩm và kéo dây đai và đóng khóa ở mức chặt vừa đủ</li> </ol>
1.5	Chống chỉ định	Đây là sản phẩm hỗ trợ bên ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành ở các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ****GIÁM ĐỐC**

Luu Chi Thieu