

CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM

Số 5 ngõ 162A/7 Tôn Đức thắng, Hàng Bột,
Đống Đa, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Hướng dẫn sử dụng nẹp đêm A6

I. Chỉ Định

Ngăn ngừa hoặc hỗ trợ điều trị các chấn thương mắt cá cấp, viêm mắt cá mãn tính, sau phẫu thuật và chấn thương mắt cá chân

II. Chống chỉ định

Đây là sản phẩm hỗ trợ ngoài cơ thể nên không có chống chỉ định

III. Bảo quản

Giặt bằng tay, không giặt máy, không dùng chất tẩy, bảo quản nơi thoáng mát.

IV. Khuyến Cáo: Không có

V. Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn kích thước phù hợp với bàn chân
2. Tháo khóa các dây đai ở tư thế mở
3. Cho chân vào sản phẩm và kéo dây đai và đóng khóa ở mức chặt vừa đủ



Bảng cỡ:

Cỡ sản phẩm	S	M	L
Mã sản phẩm	A4200	A4200	A4200



GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thủy