



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Pikosan ointment

(Kem mỡ bôi Pikosan)

**Thành phần:** mỡ, lanolin cera, keo ong

**Mục đích sử dụng:**

PIKOSAN Ointment dưỡng ẩm và làm dịu da khô, da bị kích ứng. Bôi ngoài da tạo một lớp màng bảo vệ thúc đẩy quá trình làm lành vết thương nhỏ sau khi bị côn trùng cắn, do chàm phải loại sữa và hải quỳ.

**Cách dùng:**

Chỉ dùng ngoài da, bôi kem mỡ lên vùng da tổn thương 2-3 lần/ngày để tạo lớp màng bảo vệ

**Chống chỉ định:**

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào sản phẩm

**Thận trọng:**

Để xa tầm tay trẻ em

Người di ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

Chỉ dùng ngoài da

**Bảo quản:**

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ phòng dưới 25°C

**Thể tích:** 20g

**Nhà máy:**

APIPHARMA d.o.o

Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU

**Công ty Nhập khẩu và phân phối độc quyền:**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM

Số 11, phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam