



# Ceylan

www.ceylantibbi.com.tr

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ CEYLAN

<p>Các chi dẫn dưới đây dành cho tất cả hộp hấp tiệt trùng và các phụ kiện của Ceylan. Hộp hấp và phụ kiện. Ceylan tuyên bố rằng các sản phẩm được đề cập được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ theo ISO 9001 và trong phạm vi của tiêu chuẩn.</p> <p><b>1. MÔ TẢ</b></p> <p>Hộp hấp tiệt trùng Ceylan có thể tái sử dụng; được thiết kế để chứa các dụng cụ phẫu thuật trong quá trình khử trùng bằng hơi nước trong môi trường chân không và duy trì sự tiệt trùng trong quá trình lưu trữ và vận chuyển trong điều kiện thích hợp.</p> <p>Hộp gồm 3 phần chính: Nắp hộp, đáy hộp và bộ lọc.</p> <p>Độ dày hiện tại là 2 mm. Sự khác biệt giữa các công ty khác là chúng tôi cũng sử dụng cùng độ dày cho nắp.</p> <p><b>2. HỆ THỐNG LỌC</b></p> <p>Hộp đựng của Ceylan có sẵn các loại như loại hộp hờ kèm bộ lọc kín hoặc nắp và hộp hờ (có thể thay bằng nắp kín)</p> <p>Được thiết kế sử dụng được với giấy lọc 1 lần hoặc nhiều lần; cần phải sử dụng cùng 1 loại giấy lọc trong suốt thời gian sử dụng hộp.</p>	<p><b>3. CHẤT LIỆU</b></p> <p>Chất liệu của hộp đựng là cả nhôm và thép không gỉ.</p> <p><b>4. TIỆT TRÙNG</b></p> <p>Tiệt trùng bằng hơi nước.</p> <p>Nhiệt độ tiệt trùng tối đa là 138°C (280°F)</p> <p>Thời gian tiệt trùng là 20 phút ở nhiệt độ 121°C (250°F) và 5 phút ở nhiệt độ 132°C (270°F) / 134°C</p> <p>Trong quá trình khử trùng, giơ dây và silicon madre được sử dụng bên trong hộp đựng vô trùng để bảo vệ vị trí ổn định của dụng cụ phẫu thuật. Nhôm và kim loại (dụng cụ phẫu thuật) không nên chạm vào nhau. Vì lý do này, chúng tôi đề nghị sử dụng thảm silicon hoặc vải màu xanh lá cây.</p> <p><b>5. BẢO QUẢN</b></p> <p>Trong thực tế, sự vô khuẩn có thể được duy trì đóng gói không giới hạn. Trong quá trình bảo quản trong kho bệnh viện ở điều kiện phòng (nhiệt độ, độ ẩm, lọc không khí, ... được kiểm soát)</p>	<p><b>6. LÀM SẠCH</b></p> <p>Người dùng phải được chỉ định cách làm sạch: khi nào, làm thế nào phải làm sạch hộp đựng.</p> <p>Công cụ làm sạch</p>	
---	--	--	--