

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG HỒI SỨC CẤP CỨU ĐA NĂNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN YFD5618K (IV)

1. Công dụng và quy cách:

❖ Công dụng

- Giường được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện, trường đào tạo y dược...

❖ Quy cách:

- Kích thước (kích thước sai số cho phép: 5%)
 - + Kích thước giường: Dài 2230 mm x rộng 1050 mm
 - + Điều chỉnh độ cao: 520 - 820 mm
 - + Kích thước mặt giường: 1900 x 900 mm
- Chất liệu:
 - + Sắt sơn tĩnh điện và nhựa ABS.
Không độc, kháng khuẩn
 - + Mặt giường làm bằng nhựa ABS

2. Hướng dẫn sử dụng:

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng:
- Để điều khiển các chức năng của giường ta sử dụng bằng 2 bảng điện tử gắn trên lan can tại hai bên thành giường hoặc có thể sử dụng bảng điều khiển trung tâm gắn phía cuối giường để điều khiển các chức năng sau:
 - + Nâng hạ phần đầu, phần lưng với góc độ nâng lên từ $0 \sim 75^\circ$
 - + Nâng và hạ phần đỡ chân từ: $0 \sim 40^\circ$
 - + Nâng hạ mặt giường với chiều cao lên xuống trong khoảng 300mm.
 - + Điều chỉnh mặt giường với độ nghiêng đầu và chân trong hoảng $\pm 12^\circ$
- Để cố định giường sử dụng thắng trung tâm được đặt phía đuôi giường.
- Khi di chuyển mở thắng trung tâm và đẩy giường đến vị trí cần thiết bằng 4 bánh xe có kích thước 125 mm.
- Khi người sử dụng muốn hạ mặt giường khẩn cấp khi cấp cứu chỉ cần nhấn nút "CPR" – Nút hạ mặt giường khẩn cấp, khi đó mặt giường hạ nhanh trong vòng từ 2-3 giây.
- Giường có chức năng cân bằng điện tử theo dõi trọng lượng của bệnh nhân.
- Để kiểm tra góc độ nghiêng của giường người sử dụng xem trên lan can có gắn đồng hồ đo góc độ nâng đầu giường và góc độ nghiêng của giường.
- Khi sử dụng người dung lắp đầy đủ phụ kiện kèm theo gồm:
 - + Cây treo truyền dịch 2 móc
 - + Nệm giường (L2000 x W850 x H100mm)

3. Lưu Ý

- Giường phải được đặt tại vị trí bằng phẳng, khô ráo tránh ẩm ướt, cách xa nguồn nhiệt, hóa chất ăn mòn ...
- Không để các vật nặng quá trọng tải quy định, các vật sắc nhọn lên nệm để tránh hư hỏng .
- Đọc kỹ hướng dẫn và các cảnh báo trước khi sử dụng

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



TỔNG GIÁM ĐỐC
Khuất Quang Chiến