



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY ĐỌC PHIM NHA KHOA

TÊN THƯƠNG MẠI: CRUXCAN, MODEL: CRX-1000

Giới thiệu chung	Tên thương mại: CRUXCAN Model: CRX-1000 Bao gồm những bộ phận chính sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thân máy</li><li>- Tấm phim phốt pho</li><li>- Túi đựng phim</li><li>- Tấm bọc phim</li></ul>
Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cắm kết nối máy với nguồn điện</li><li>- Bật nút nguồn của máy</li><li>- Bọc tấm phim phốt pho vào túi đựng phim</li><li>- Bỏ tất cả vào tấm bọc phim</li><li>- Đưa vào vùng răng cần chụp x quang trong miệng bệnh nhân</li><li>- Sau khi chụp x quang xong, bỏ tấm bọc phim</li><li>- Mở túi đựng phim cho tấm phim phốt pho rơi vào khay trên máy sao cho mặt màu xanh nhạt quay lên trên.</li><li>- Khi phim rơi vào máy, bật nút quét phim</li><li>- Hình chụp sẽ hiện trên màn hình của máy</li><li>- Phim sẽ được nhả ra ở phía dưới</li><li>- Nhấn nút truyền hình ảnh ra máy tính bên ngoài</li></ul>
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Không cho phim khác vào máy khi đang đọc phim</li><li>- Khi phim bị kẹt trong máy nhấn nút E/M để máy nhả phim ra</li><li>- Không nhấn nút E/M khi máy đang đọc phim bình thường</li><li>- Lưu ý thiết lập liều tia phù hợp theo bảng hướng dẫn</li></ul>