



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

MERUFA JOINT STOCK COMPANY

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, T.p Hồ Chí Minh

Nhà máy: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM

Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28). 3765 4161

Website: www.merufa.com.vn E-mail: merufa@merufa.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

GĂNG KHÁM BỆNH (GĂNG KIỂM TRA; GĂNG Y TẾ CỔ TAY DÀI)

I. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐEO

Rửa tay:

- Để loại bỏ hầu hết số vi khuẩn và vi sinh vật lây nhiễm.
- Phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
- Sau khi rửa hai tay phải để cao ngang ngực, không được va chạm vào các thứ xung quanh.
- Sắp xếp các dụng cụ phải từ ngang eo trở lên.

II. HƯỚNG DẪN ĐEO GĂNG

- Găng chưa tiệt trùng: Đeo găng đúng cỡ, phù hợp với tay.
- Găng dùng chung cho cả tay trái và tay phải.
- Sau khi đã đeo cả hai tay mới tiến hành chỉnh sự phù hợp, độ khít của cả hai găng.

III. THÁO GĂNG ĐÚNG

- Tháo găng thứ nhất: dùng tay kia cầm lấy mặt ngoài cổ găng lột nhẹ ra ngoài. Sau đó cầm ở lòng bàn tay của tay còn đeo găng.
- Tháo găng thứ hai: dùng một hoặc hai ngón tay của tay đã tháo găng cầm lấy mặt trong cổ găng lột nhẹ ra ngoài. Sau đó cầm mặt trong đã được lột ra kéo lần lần cho găng ra khỏi tay đồng thời kéo luôn cả găng thứ nhất đang cầm ở lòng bàn tay.
- Tiến hành rửa lại tay cho đúng cách.
- Găng sử dụng bỏ vào thùng rác hay hộp chuyên dùng để tránh lây nhiễm vi khuẩn, nhiễm bẩn.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG GĂNG

- Thông thường đeo găng tay thuận trước và tháo găng của tay thuận sau.
- Trong trường hợp mặc áo choàng dài tay thì cần phải đeo găng sao cho găng tay bao trùm lên trên cổ tay áo choàng.
- Sau khi đeo găng lau hết bột bên ngoài bằng 1 miếng bọt xốp ẩm, hay khăn mềm ướt đã tiệt trùng hay một biện pháp hữu hiệu khác.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



Cn. Lưu Tiên Cảo